

DETECTEUR DES CHALEURS ESTROTECT



ESTROTECT est un détecteur visuel de chevauchements, simple et rapide à poser. Il permet d'identifier les vaches en chaleurs, les inséminer à temps et donc d'améliorer les performances reproductives.

Valable en 5 Couleurs



INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Garder à chaud les détecteurs de chaleurs

Les indicateurs de chaleurs ESTROTECT doivent être chauffés à 38 °C immédiatement avant l'application pour une meilleure adhésion.



Endroit d'application

Placer ESTROTECT à mi-chemin entre la hanche et la base de la queue perpendiculairement à la colonne vertébrale.



Brosser soigneusement les poils

Brosser vigoureusement l'endroit d'application (la présence de saleté, de poussière et de poils morts réduira l'adhérence).



Nettoyez les poils

Nettoyez la surface avec un chiffon propre pour éliminer toute saleté, poussière, sable ou sciure de bois.




Appliquez ESTROTECT

Placez ESTROTECT à mi-chemin entre la hanche et la base de la queue. Appuyez fermement. Ne pas appliquer par temps pluvieux.

VÉRIFIEZ LES RÉSULTATS

Lorsque les vaches sont chevauchées, les pellicules argentées et noires s'enlèvent par friction et laissent apparaître la sous-couche en couleur. Au fur et à mesure des chevauchements, cette pellicule va progressivement disparaître et donner ainsi avec précision le moment des réelles chaleurs et donc de l'insémination.

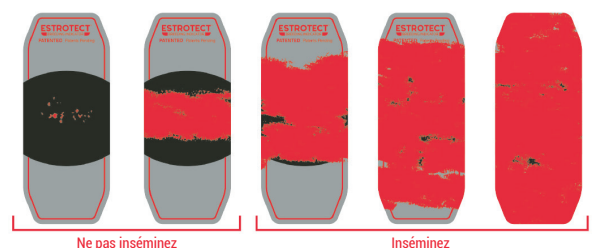

Ne pas inséminer

Inséminer

كاشف الشبق استروتيك

استروتيك هو كاشف بصري للشبق، بسيط وسريع الوضع. فهو يساعد على ضبط الأبقار في حالة الشبق وتلقيحها اصطناعيا في الوقت المناسب وبالتالي تحسين الكفاءة التناسلية لتطبيع الابقار.



متوفر بخمسة ألوان



طرق استخدام الملصقات لكشف الشبق

تسخين ملصقات كشف الشبق

يجب تسخين ملصقات كشف الشبق استروتيك إلى 38 درجة مئوية على الفور قبل التطبيق لالتصاق أفضل.



مكان الوضع

يوضع استروتيك بين الورك وقاعدة الذيل بشكل عمودي على العمود الفقري.



مشط الشعر بعناية

يمشط مكان وضع الملصقات جيدا لتفادي وجود الأوساخ، الغبار والشعر الميت الذي يقلل من عملية الالتصاق.



تنظيف مكان الوضع

ينظف السطح بقطعة قماش نظيفة لإزالة الأوساخ، الغبار، الرمل أو قطع النجارة، الخ.




تطبيق استروتيك

يوضع استروتيك بين الورك وقاعدة الذيل ويضغط عليه بقوة ليتم الالتصاق.



الكشف عن النتائج

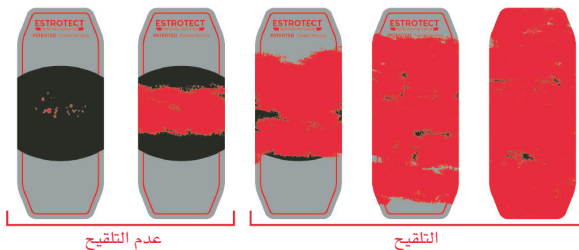

عدم التلقيح

التلقيح

عند ظهور علامات الشبق، يمسح الشريط الفضي والأسود عن طريق الاحتكاك وتكشف الطبقة الملونة. اختفاء اللونين الأسود والفضي تدريجيا، يبين بدقة لحظة الشبق الحقيقية المناسبة للتلقيح الفعلي.